

器械清洗使用说明书



iSmile 器械清洗剂

1 瓶

299.00元

3.8L/桶

- 去除器械、正畸件、牙冠和车针上的粘结材料、修复材料、含有硅酸盐材料和抛光材料；无腐蚀性成份；含有防锈剂；
- 含有非离子表面活性剂；按 1份清洗剂与10份的纯水配合使用；
- 每桶可配置成41.8升的清洗液；

货号

996879



iSmile 器械强力清洗剂

1 瓶

299.00元

3.8L/桶

- 强力去除器械、假牙、正畸件、牙冠和车针上的血渍、牙垢、结石、烟渍、食物残留、临时冠和水门汀；
- 请勿在铝制容器中使用；请勿在超声波容器中使用；

货号

996880



多用途多酶清洁抑菌泡腾片

1 盒

359.00元

64片/盒

- 无腐蚀性成份；无离子成份；可生物降解；含有薄荷味；
- 配置器械浸泡液：2-4片泡腾片配3.8升纯水；
- 配置超声波清洗液：2片泡腾片配3.8升纯水；
- 配置物体表面清洁除菌剂：2片泡腾片配6-8升纯水；
- 配置牙椅抽吸系统清洗液：2-4片泡腾片配3.8升纯水；

货号

996881



塑料盒-器械浸泡盒

1 盒

66.00元

1套/盒

- 与清洁剂、消毒剂或冷杀菌剂一起使用；
- 容量：可容纳 3.8升溶液；
- 尺寸：长 352mm，宽 244mm，高 130mm；

货号

996883



刷子-车针清洁

1 袋

16.90元

1个/袋


- 尺寸：长 6cm，宽 2cm；
- 可高温高压灭菌；

货号


颜色

993015

金黄色

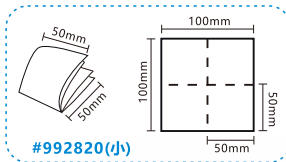

#992820(小)

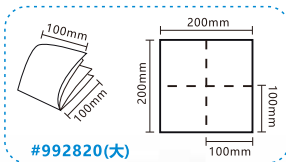

#992820(大)



无纺布片-黏胶棉片

200片/包

- 清洁小型器械、术前手部、精密仪器表面清洁的最佳材料；吸水量为自身重量的10倍；
- 表面光滑，无绒毛，是传统纱布片的替代品；颜色：白色；
- 一次性使用；
- 一类医疗器械；

货号	折叠尺寸	展开尺寸	1包
992820	小号, 50 x 50mm	100 x 100mm	4.20元
992822	大号, 100 x 100mm	200 x 200mm	16.00元

强力去污步骤

强力去除器械、假牙、正畸件、牙冠和车针上的血渍、牙垢、结石、烟渍、食物残留、临时冠和水门汀；


第一步、准备好需要清洗的器械、清洗剂（996880）、刷子（993015）、器械浸泡盒（996883）和无纺布片（992820/992822）；



第二步、将器械强力清洗剂与水进行1：10配置，倒入器械浸泡盒中，浸泡5-10分钟；



第三步、浸泡后，用刷子对器械进行清洁。
清洗液为1杯纯水+1勺小苏打配置。

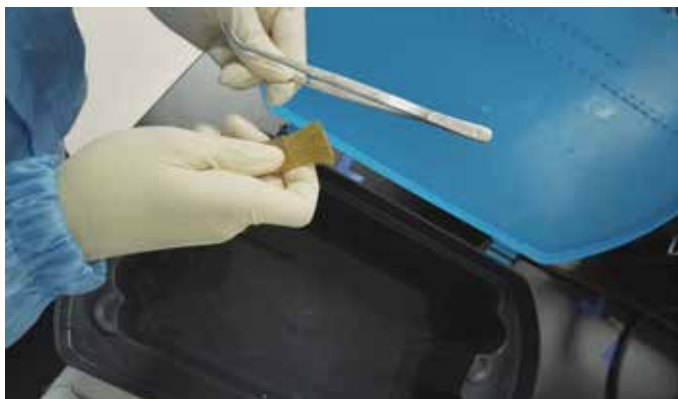

第四步、清洁后，用无纺布擦拭器械。



第五步、将器械清洗剂（996879）与水进行1：10配置，
倒入超声波清洗器中2-10分钟，对器械进行除锈。



第六步、除锈后，将器械装入灭菌袋，准备灭菌；



抑菌去污步骤

内含蛋白酶，去污的同时可抑制器械上的病毒、细菌；
无腐蚀性成份，无离子成份，可生物降解，含有薄荷味；


第一步、准备好需要清洗的器械、多用途酶清洁抑菌泡腾片（996881）、
刷子（993015）、器械浸泡盒（996883）和无纺布片（992820/992822）；



第二步、将2-4片泡腾片配3.8升纯水（建议使用不超过60℃的纯水），
倒入器械浸泡盒中，浸泡10-30分钟；



第三步、浸泡后，用刷子对器械进行清洁。
清洗液为1杯纯水+1勺小苏打配置。

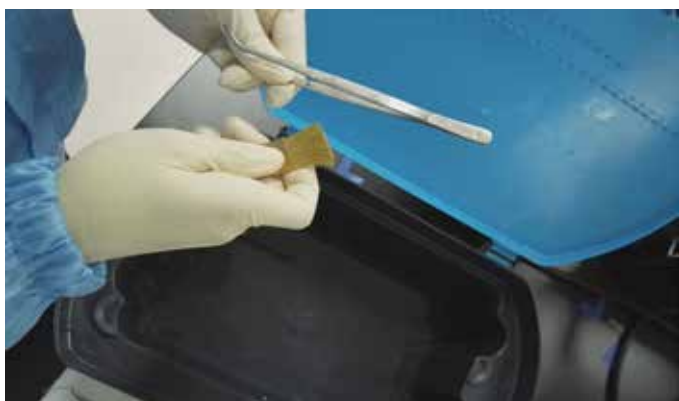

第四步、清洁后，用无纺布擦拭器械。



第五步、将器械清洗剂（996879）与水进行1：10配置，
倒入超声波清洗器中2-10分钟，对器械进行除锈。



第六步、除锈后，将器械装入灭菌袋，准备灭菌；



快速清洁步骤

快速去除器械、正畸件、牙冠和车针上的粘结材料、修复材料、含有硅藻盐材料和抛光材料；
无腐蚀性成份；含有防锈剂；


第一步、准备好需要清洗的器械、器械清洗剂（996879）、刷子（993015）、
器械浸泡盒（996883）和无纺布片（992820/992822）；



第二步、将器械清洗剂（996879）与水进行1：10配置，
倒入超声波清洗器中2-10分钟，对器械进行清洁。



第三步、浸泡后，用刷子对器械进行清洁。
清洗液为1杯纯水+1勺小苏打配置。

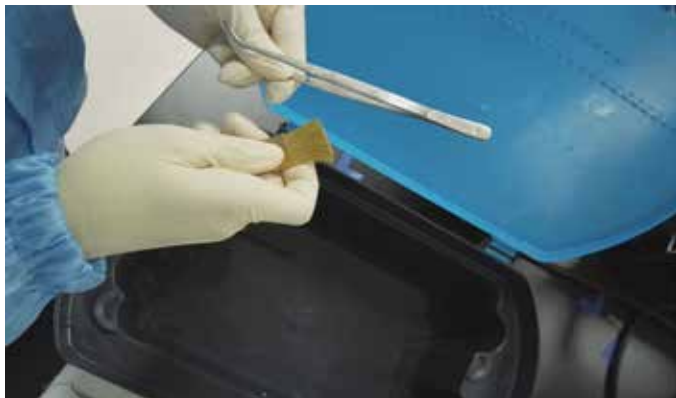

第四步、清洁后，用无纺布擦拭器械。



第五步、擦拭后，将器械装入灭菌袋，准备灭菌；

